

Sicherheitshinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Jeglicher Eingriff, außer die übliche Reinigung und Wartung durch den Kunden, muss vom Vertriebspartner des Herstellers oder durch einen zugelassenen Fachmann ausgeführt werden.

Setzen Sie weder die **dry now⁺**, noch das Stromkabel oder den Stromstecker Wasser oder einer anderen Flüssigkeit aus. Wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sind, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und tauschen diese Komponenten umgehend aus. Ersetzen Sie Ihr Netzteil durch ein Originalprodukt. Positionieren Sie die **dry now⁺** auf einer flachen, trockenen und stabilen Oberfläche. Sehen Sie niemals direkt in die UV-C-Lampe, die sich in der Trocknungskammer befindet. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel. Verwenden Sie niemals ein Reinigungsmittel oder ätzende Produkte, um Ihre **dry now⁺** zu reinigen.

Ein Verstoß gegen diese Anweisungen führt zum Erlöschen der Garantie. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine fehlerhafte Handhabung wie eine Verwendung abweichend von diesen Anweisungen entsteht.

Hinweise zur Pflege des Produkts

Mit einem weichen Tuch reinigen. Sprühen Sie keine Flüssigkeit ins Gerät. Bewahren Sie die **dry now⁺** geschlossen auf, wenn Sie es nicht verwenden, um Ablagerung von Verunreinigungen zu vermeiden.

Richtlinie für Medizinprodukte

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EEC bezüglich Medizinprodukten.



Garantie

24 Monate (inklusive Kabel und Netzteil). Bei einer Störung kontaktieren Sie bitte Ihren Hörgeräteakustiker. Für alle Eingriffe durch den Vertriebspartner während der Garantielaufzeit ist der Kaufbeleg nötig. Diese Garantie gilt nicht bei einer Störung, die durch einen Unfall, einen Zwischenfall oder einen ähnlichen Schaden, die Einbringung von Flüssigkeit, Fahrlässigkeit, falsche Verwendung, Zerlegung, mangelnde Wartung oder allen anderen Umständen, die dem Nutzer zuschreiben sind, verursacht wird. Außerdem gilt diese Garantie nicht bei Fehlern, die durch Blitzschlag oder anderen Schwankungen der Netzspannung verursacht werden. Wir empfehlen, die **dry now⁺** während eines Gewitters vom Stromnetz zu trennen.

drynow⁺

Hörgeräte
Trockner


Kompatibel mit allen Hörgeräten
(inklusive wiederaufladbarer Geräte)

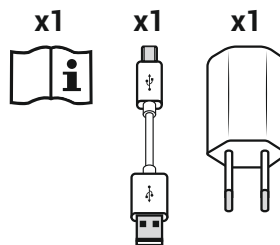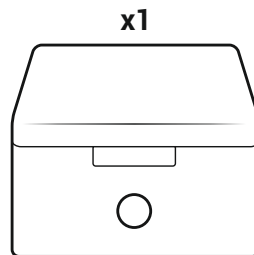

1 Die **dry now*** anschließen. Die blaue LED leuchtet, um anzuzeigen, dass das Gerät einsatzbereit ist. Wenn 30 Sekunden lang keine Handlung erfolgt, schaltet sich die Anzeige aus.


2 Achten Sie darauf, dass vor Start des Trocknungszyklus die Abdeckung geschlossen ist. Öffnen Sie das Gehäuse nicht während des Betriebs, zu Ihrer Sicherheit schaltet sich die **dry now*** gegebenenfalls aus.

Die **dry now*** ist für alle Arten von Hörsystemen inkl. wiederaufladbare Geräte geeignet.

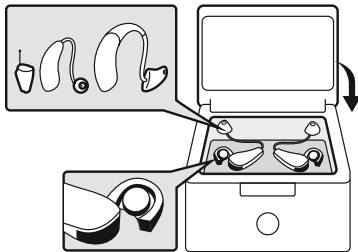

Es empfiehlt sich, die Hörsysteme vor der Trocknung zu reinigen.

3 Zum Starten des Vorgangs einfach die Taste berühren. Die blaue Leuchtanzeige pulsiert langsam. Die **dry now*** schaltet sich automatisch am Ende des Trocknungszyklus ab (45 Minuten).

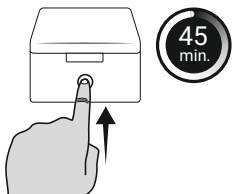

Bedeutung der Leuchten

Blau pulsiert > In Betrieb
Blau leuchtet durchgehend > Im Standby-Modus

Angaben auf dem Etikett

Dieses befindet sich an der Unterseite Ihrer **dry now***.

Bedeutung der Abkürzungen:

- V** Volt (elektrische Spannung)
- A** Ampere (elektrische Stromstärke)
- USB-Stromversorgungssymbol
- Verwendung im Innenbereich
- Das Produkt besteht aus ABS gemäß der Recyclingvorschriften 7
- Dieses Produkt erfüllt alle europäischen Richtlinien, die für Medizinprodukte anzuwenden sind
- ENTSORGUNG**
Entsorgen Sie Altgeräte auf umweltschonende Weise. Die Altgeräte enthalten recycelbare Materialien, die wiederverwertet werden. Entsorgen Sie Altgeräte daher bitte über ein geeignetes Entsorgungssystem.

Details zu den Funktionen

UV-C 360°

Die **dry now*** verfügt über eine UV-C-Lampe mit kurzer Wellenlänge, deren ringförmige Anordnung in 360° dafür sorgt, dass die gesamte Oberfläche des Hörgeräts erreicht wird. Die Reinigung erfolgt durch eine Kombination aus Entfeuchtung durch Warmluft, die durch einen Impulsventilator zugeführt wird, und UV-C um 360°. Die UV-C-Lampe leuchtet während der ersten fünf Minuten des Pflege- und Reinigungszyklus und erlischt danach automatisch.

Entfeuchtung

Die **dry now*** hat ein Entfeuchtungssystem durch patentiertes Impulsluftverfahren. Aufgrund dessen ist die Leistung und die notwendige Trocknungszeit reduziert. Die Temperatur der Reinigungskammer wird durch ein elektronisches System kontrolliert, um eine Temperatur zu erreichen, die unabhängig von der Umgebungstemperatur unter 35°C liegt, um die Hörsysteme nicht zu beschädigen. Um die optimale Qualität Ihrer Hörsysteme zu erhalten, wird die tägliche Verwendung der **dry now*** empfohlen.

Technische Daten

Funktionen

Abmessungen innen (BxHxT): 70x21x51 mm	Trocknungstemperatur: 35°C
Abmessungen außen (BxHxT): 93x48x76 mm	Zyklusdauer: 45 min.
Gewicht (g): 144 g	Betriebsumgebungstemperatur: Von 12°C bis 40°C
UV-Lampe: 253,7 Nm	
Leistung max.: 4W	
Leistung im Standby-Modus: 0,04 W	Stromversorgung:
Software: 00-PDLC-LOG-V0101	Eingang: 100-240V AC 50-60 Hz/Ausgang: 5V DC
Lagerbedingungen: zwischen -20°C und +65°C	Anschluss: USB-Kabel - Micro-USB



Ich schone die Umwelt, ich stecke meine **dry now*** aus, wenn meine Hörgeräte gereinigt sind!